



Manual do Usuário

Andador Klip

Posterior

Itens

Andador Klip de duas rodas

KP210, KP220R, KP230

Andador Klip de quatro rodas

KP410, KP420R, KP430, KP440B

Andador Klip de quatro rodas com assento

KP510, KP520R, KP530, KP540B

Andador Klip de quatro rodas com rodas de 8"

KP418, KP428R, KP438, KP448B

Andador Klip com quatro rodas de 8" e assento

KP518, KP528R, KP538, KP548B

Ref # Klip Walker, KP220R

Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53

B-1030 Brussels, Belgium

Max User Mass 38.5 kg/85 lbs.



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o andador posterior Klip!

Para operar e manter seu andador com segurança, leia este Manual do Usuário cuidadosamente antes de usá-lo e guarde-o para referência futura. Cuide apropriadamente de seu andador, isto irá garantir longevidade e todos os benefícios de suas características.



USO GERAL

ABRIR O ANDADOR: Segure uma das pernas (hastes) dianteiras e uma traseira e afaste-as uma da outra. Continue a desdobrar a estrutura até que os pinos de pressão da trava se encaixem no lugar e se sobressaiam totalmente dos orifícios.

MONTAGEM: Combine as marcações numeradas na perna com as da moldura, pressione os pinos e deslize para dentro da moldura da perna (haste).

AJUSTE DE ALTURA: Para determinar a altura correta para o andador, o comprimento medido da dobra do punho do usuário ao chão deve ser a altura do punho do aparelho.

Para ajuste da altura, pressione o pino em cada perna (haste) e deslize-a para a posição adequada. Sempre verifique se todas as 4 pernas (haste) têm a mesma altura e se os pinos de pressão estão totalmente salientes dos orifícios.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR RODAS ROTATÓRIAS:

Pressione a alavanca verde para travar a roda e levante para destravar. Certifique-se de que a roda se encaixa (click) no lugar ao travá-la.

NOTA: Este recurso não está disponível em modelos com rodas de 8".

RODAS TRASEIRAS UNIDIRECIONAIS: Para soltar a trava direcional, levante o pino de alumínio e coloque-o em seu suporte de descanso.

CONFIGURAÇÃO ANTERIOR / POSTERIOR: As hastes dianteiras e traseiras podem ser trocadas para alternar do uso posterior para anterior em todos os modelos exceto KP210, KP410, KP510 e modelo mini.

DOBRAR O ANDADOR: Em frente ao andador na extremidade aberta, levante as rodas dianteiras de modo que o andador fique apoiado nas rodas traseiras, pressione os pinos da trava e empurre as hastes dianteiras em direção às traseiras.

ASSENTO: Levante o assento ao levantar e caminhar. Dobre o assento para sentar e descansar. Ao dobrar o andador, o assento deve estar elevado.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Inspeccione o andador verificando todos os parafusos e porcas regularmente.

Mantenha o andador limpo para garantir longevidade e conforto ao usá-lo. Misture água morna com um detergente neutro e esfregue suavemente o andador. Finalize a limpeza com um pano macio e seco.

GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Esta garantia é exclusivamente para o benefício do comprador consumidor original e está em vigor a partir da data de compra.

A Circle Specialty Inc. garante que a estrutura do Andador Klip estará livre de defeitos, por um período de um (1) ano.

A garantia não se estende a componentes não duráveis, como acessórios de borracha e punhos.

Esta garantia não cobre falha do equipamento por uso indevido do proprietário ou negligência. Só se aplica quando o produto é usado de acordo com as condições especificadas e para os fins pretendidos.

Se dentro do período de garantia qualquer um desses produtos for comprovado como defeituoso, tal produto será consertado ou substituído por opção da Circle Specialty ou de seu Representante. Os custos de transporte são por conta do proprietário.

Se você tiver alguma dúvida sobre o andador Klip ou sobre esta garantia, entre em contato com o revendedor autorizado.



Circle Specialty, Inc.
Brooklyn, NY 11232, EUA
718.943.6452
info@circlespecialty.com



Butuí, 144 / 302 - Cristal
90820-150 – Porto Alegre – RS
Fone: 55-51-3030.1111 ou 55-51-9.9966.9999
kapra@kapra.com.br